


# VITAMMY®

## COLIBRI

Aspirator do nosa  
Model NS14

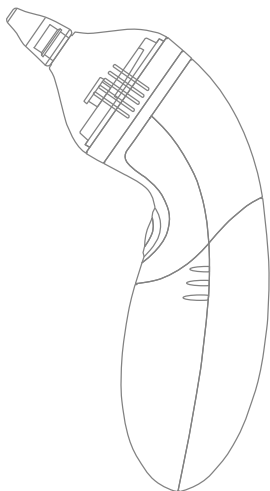

### INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

---

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją.

**SPIS TREŚCI**

---

|   |    |
|---|----|
| Instrukcja użytkownika  | 1  |
| Wprowadzenie  | 3  |
| Ważne informacje przed użyciem  | 3  |
| Identyfikacja części  | 5  |
| Wymiana baterii   | 6  |
| Instrukcja użycia   | 7  |
| Czyszczenie i konserwacja   | 9  |
| Rozwiązywanie problemów   | 11 |
| Specyfikacja techniczna   | 12 |
| Tablice EMC   | 13 |
| Zastosowane normy i symbole   | 16 |
| Utylizacja niepotrzebnego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej | 16 |
| Gwarancja   | 17 |
| Informacje Kontaktowe   | 20 |

## WPROWADZENIE

---

### 1. **Duża moc**

Umieść końcówkę aspiratora w nozdrzu, a następnie usuwaj wydzielinę w sposób ciągły lub etapami (z przerwami).

### 2. **Bezpieczeństwo**

Dzięki zastosowaniu miękkich, specjalnie wyprofilowanych końcówek odsysanie wydzieliny jest bezpieczne i bezbolesne.

### 3. **Wygoda**

Urządzenie jest kompaktowe, wygodne do trzymania i łatwe w obsłudze. Jest ono również bezpieczne i łatwe do stosowania u dzieci.

### 4. **Specjalna konstrukcja głowicy łatwa do czyszczenia**

Końcówki, zbiorniczek na wydzielinę oraz głowicę urządzenia można demontować i myć pod bieżącą wodą (części te można dodatkowo dezynfekować wrzącą wodą).

### 5. **Lekki i cichy**

Nadaje się do stosowania także, gdy dziecko śpi.

### 6. **Na baterie**

Urządzenie do pracy potrzebuje tylko dwóch baterii alkalicznych 1,5 V typu AA; baterie można łatwo wymienić w każdej chwili i dowolnym miejscu.

## WAŻNE INFORMACJE PRZED UŻYCIEM

---

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi aspiratora do nosa, aby w sposób prawidłowy i bezpieczny dokonać aspiracji wydzieliny u dzieci.

### UWAGA

- △ Aspirator do nosa służy do łatwego i skutecznego usuwania wydzieliny i śluzu z nosa u dzieci w wieku 0–12 lat w warunkach domowych.
- △ Wydzielinę i śluz można odsysać w sposób ciągły lub przerywany.
- △ Nie rozkręcaj, nie naprawiaj ani nie przerabiaj urządzenia.

# VITAMMY® COLIBRI


- △ Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności oraz bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- △ Uważaj, aby urządzenie nie było narażone na wstrząsy, upuszczenie.
- △ Wymień wszystkie baterie, gdy moc i/lub dźwięk pompy stają się coraz słabsze podczas korzystania z urządzenia.
- △ Zaleca się wyjęcie baterii z urządzenia, gdy nie będzie ono używane przez dłuższy czas.
- △ Aplikacja podciśnienia przez urządzenie ma charakter przerywany i chwilowy. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje rozpoczęcie odsysania, a jego zwolnienie wyłącza urządzenie i tym samym zatrzymuje odsysanie.
- △ Aspirator do nosa służy jedynie do czyszczenia / usuwania wydzieliny i śluzu z nosa. Nie należy używać tego urządzenia w sposób inny niż zgodny z przeznaczeniem.
- △ Podczas korzystania z urządzenia dziecko nie powinno wstrzymywać oddechu, zamykać ust ani przełykać śliny, aby uniknąć nierównomiernego obciążenia błony bębenkowej przez powstające podciśnienie.
- △ Jeśli podczas stosowania urządzenia dziecko poczuje się źle, należy przerwać aspirację i natychmiast skonsultować się z lekarzem.
- △ Nie wolno stosować nadmiernej siły podczas wprowadzania końcówki aspiratora do jamy nosowej.
- △ To urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego. W przypadku schorzeń nosa należy skonsultować się z lekarzem.
- △ Wyczyścić końcówki aspiratora przed każdym użyciem.
- △ Do obsługi tego urządzenia przeznaczeni są rodzice lub dorośli, którzy są zdolni stosować się do zaleceń i uwag zawartych w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia. Urządzenie to nie może być stosowane samodzielnie przez dzieci. Aspirator do nosa należy przechowywać z dala od dzieci. Nie pozwól, aby dzieci obsługiwały urządzenie samodzielnie.
- △ Nie stosuj aspiratora do nosa w przypadku pacjentów z następującymi przeciwwskazaniami: krwawienie z nosa, poważne obrażenia twarzy, szyi, głowy, zaburzenia krzepnięcia krwi.
- △ Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie

przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Niewłaściwe użycie urządzenia może spowodować następujące zagrożenia/powikłania:

- urazy mechaniczne
  - podrażnienie nosa
  - krwawienie śluzówki
  - dyskomfort i ból
- ⚠ Końcówki należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, by nie mogły ich przypadkowo połknąć.
- ⚠ Końcówka do nosa może potencjalnie powodować reakcje alergiczne. Z tym aspiratorem należy stosować wyłącznie fabryczne końcówki VITAMMY. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem, aby dokonać ich zakupu.

## IDENTYFIKACJA CZĘŚCI


---

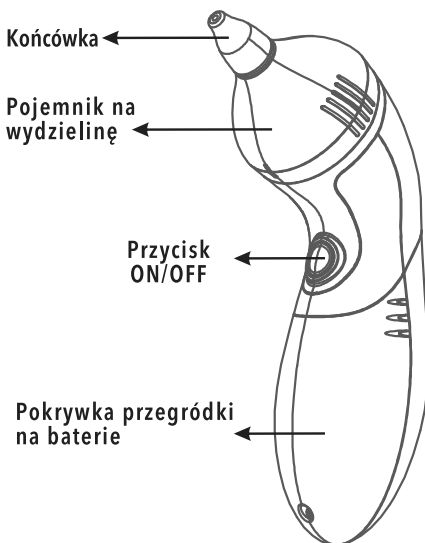

**WYMIANA BATERII**

---

1. Delikatnie odsuń przykrywkę przegródki na baterie.
2. Ostrożnie wyjmij zużyte baterie i zutylizuj je zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zawsze stosuj nowe baterie.
4. Włóż dwie nowe baterie (alkaliczne 1,5V AA) zgodnie z polaryzacją.
5. Załóż przykrywkę przegródki.

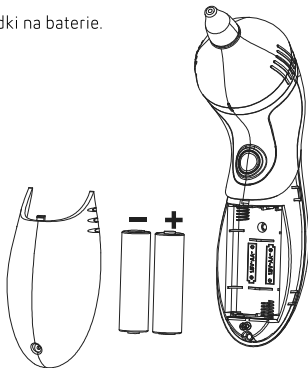**UWAGA**

- △ Baterie trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci; z dala od źródła ciepła.
- △ Jeżeli aspirator nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii.

Baterie zutylizuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nie wyrzucaj baterii razem z innymi odpadami.


## INSTRUKCJA UŻYCIA

---

1. Dobierz odpowiednią końcówkę do kształtu i rozmiaru nozdrzy dziecka i rodzaju wydzieliny.

### **Duża końcówka**

Zalecana starszym dzieciom i gdy wydzielina jest gęsta.

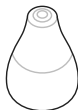


### **Miała końcówka**


Zalecana młodszym dzieciom i w przypadku, gdy wydzielina jest rozwodniona i ciekła.



2. Upewnij się, czy końcówka została dobrze założona i czy całkowicie obejmuje pierścień zabezpieczający na wylocie głowicy.

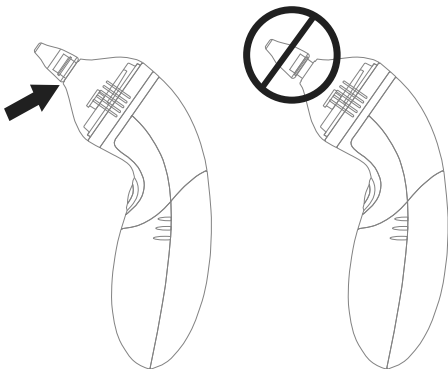


- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika ON/OFF, aby rozpocząć odsysanie wydzieliny.

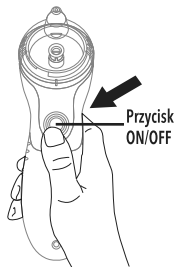

- Utrzymuj głowę dziecka prosto (w pionie) i wprowadź końcówkę do jednego z nozdrzy dziecka. Uważaj, aby nie wepchnąć końcówki zbyt głęboko do nozdrza lub aby nie napierać na tylną ścianę jamy nosowej. Staraj się utrzymywać aspirator w takiej pozycji, aby końcówka była prostopadła do powierzchni twarzy dziecka. Nie kieruj końcówki w górę, wgłąb nozdrza dziecka – znajduje się tam głównie powietrze, a wydzielina poniżej (patrz rysunek). Poczekaj, aż aspirator wciągnie wydzielinę. W razie konieczności czynność powtórz w drugim nozdrzu lub przeprowadź ponownie.

Odessana wydzielina może nie od razu pojawić się we wnętrzu zbiorniczka. Po każdym użyciu zaleca się szybkie oczyszczenie końcówki, wraz z głowicą i zbiorniczkiem po ich uprzednim demontażu z urządzenia.

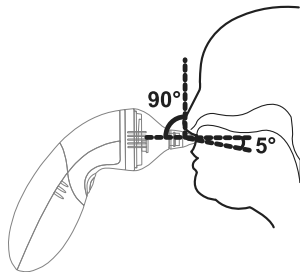

- Zwolnij przycisk, aby zakończyć odsysanie.




## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


---

### Czyszczenie zbiornika na wydzielinę, głowicy i końcówek aspiratora

1. Zdemontuj końcówkę i głowicę z urządzenia delikatnie wysuwając te elementy.

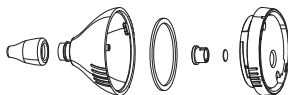

2. Odkręć zbiorniczek na wydzielinę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

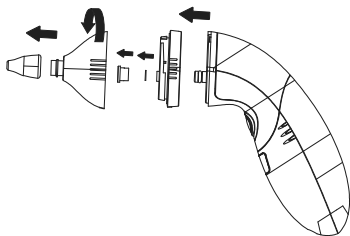

3. Myj wszystkie wymienione części wodą z detergentem przez 3 minuty.
4. Następnie płucz pod bieżącą, gorącą wodą przez 3 minuty i pozostaw do wyschnięcia. Po czyszczeniu wymienione elementy mogą zostać zdezynfekowane poprzez gotowanie.




- ⚠ Nie wolno myć głowicy i całego urządzenia przy pomocy mydła czy innych środków czyszczących.
- ⚠ Zaleca się również zdjęcie i umycie gumowej uszczelki z głowicy by mieć pewność, że całe urządzenie jest suche i by uniemożliwić rozwój bakterii.



# VITAMMY® COLIBRI

## Czyszczenie urządzenia głównego

Wytrzeć urządzenie czystą, suchą i miękką ściereczką.

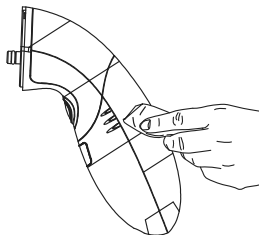

### UWAGA!

- △ Nie wolno myć tego urządzenia wodą lub jakąkolwiek cieczą (taką jak rozpuszczalniki, czy benzyna ekstrakcyjna). Zaleca się wycieranie urządzenia miękką szmatką i utrzymywanie urządzenia w czystości.
- △ Należy pozwolić wyschnąć wszystkim elementom urządzenia przed ich ponownym zmontowaniem.
- △ Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci, wysokich temperatur i bezpośrednich promieni słonecznych.
- △ Urządzenie należy chronić przed uderzeniami i wstrząsami.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


| <b>Problem</b>  | <b>Możliwa przyczyna</b>   | <b>Rozwiązanie</b>  |
|---|--|---|
| Odsysanie jest słabe lub urządzenie w ogóle nie odsysa (urządzenie w ogóle nie działa). | Baterie są zużyte lub zainstalowane nieprawidłowo.   | Sprawdź polaryzację, baterie lub wymień baterie na nowe.  |
|   | Brakuje uszczelki w postaci szarego, gumowego pierścienia w gwintowanym gnieździe zbiornika na wydzielinę. | Sprawdź, czy uszczelka jest prawidłowo zamontowana lub zamontuj ją prawidłowo w gnieździe zbiornika wydzieliny. |
|   | Zbiornik na wydzielinę jest niepoprawnie zamontowany.  | Upewnij się, że znaczniki na bokach zbiornika na wydzielinę są ustawione równo ze znacznikami na głowicy.       |

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Moc ssąca                | 400 mmHg (53,3 kPa)  |
| Ciśnienie akustyczne     | ≤75 dB   |
| Materiał końcówki ssącej | silikon  |
| Silnik                   | 3V prąd stały  |
| Warunki użytkowania      | temperatura 16 ~ 35 °C                                       |
|                          | wilgotność względna do 85%                                   |
| Warunki przechowywania   | temperatura -25°C ~ +55°C                                    |
|                          | wilgotność względna do 85%                                   |
| Zasilanie                | 2 baterie alkaliczne 1,5V AA                                 |
| Czas pracy na bateriach  | ok. 90 minut w zależności od rodzaju i marki użytych baterii |
| Waga                     | ok. 146 g (bez baterii)                                      |
| Wymiary                  | ok. 50,6 x 92,7 x 170,8 mm                                   |

## TABLICE EMC

| <b>Wskazówki i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna</b>   |                                       |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Elektryczny aspirator do nosa VITAMMY COLIBRI NS14 jest przeznaczony do stosowania w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik aspiratora powinien upewnić się, że jest on stosowany w takim środowisku. |                                       |                                       |   |
| <b>Test odporności</b>  | <b>Poziom testowy IEC 60601</b>       | <b>Poziom zgodności</b>               | <b>Wskazówki dotyczące otoczenia elektromagnetycznego</b>   |
| Wyladowanie elektrostatyczne IEC 61000-4-2  | +/- 6kV styk<br><br>+/- 8kV powietrze | +/- 6kV styk<br><br>+/- 8kV powietrze | Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub wykonane z płytek ceramicznych. Jeśli podłogi pokryte są materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna wynosić przynajmniej 30%. |
| Pole magnetyczne zasilania o częstotliwości (50/60 Hz) IEC 61000-4-8  | 3 A/m                                 | 3 A/m                                 | Poziom pól magnetycznych źródeł zasilania powinien mieścić się w granicach obowiązujących dla typowych instalacji handlowych lub szpitalnych.                                       |

| <b>Wskazówki i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna</b>   |   |                             |  |
|---|---|-----------------------------|--|
| Elektryczny aspirator do nosa VITAMMY COLIBRI NS14 jest przeznaczony do stosowania w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik aspiratora powinien upewnić się, że jest on stosowany w takim środowisku. |   |                             |  |
| <b>Test<br/>Odporności</b>  | <b>Poziom<br/>testowy<br/>IEC 60601</b> | <b>Poziom<br/>zgodności</b> | <b>Wskazówki dotyczące otoczenia<br/>elektromagnetycznego</b>  |
| Emitowany sygnał o częstotliwości radiowej IEC 61000-4-3  | 3 V/m<br>80 MHz do<br>2,5 GHz           | 3 V/m                       | <p>Przenośne i ruchome środki łączności radiowej powinny być używane w odległości od jakichkolwiek elementów urządzenia łącznie z jego przewodami, która jest nie mniejsza niż odległość zalecana, obliczona z równania częstotliwości nadajnika. Zalecana odległość:</p> $d=1,2\sqrt{P}$ $d=1,2\sqrt{P} \quad 80\text{MHz do } 800\text{MHz}$ $d=2,3\sqrt{P} \quad 800\text{MHz do } 2,5\text{GHz}$ <p>gdzie P jest maksymalną mocą znamionową nadajnika w watach (W) zgodnie z danymi producenta, a d jest zalecaną odległością w metrach (m). Natężenia pól pochodzących od stałych nadajników RF, jak określono w pomiarach pól elektromagnetycznych w terenie, a powinny być niższe niż poziom zgodności dla każdego zakresu częstotliwości b. Zakłócenia mogą pojawiać się w pobliżu urządzeń oznaczonych następującym symbolem:</p>  |

### Wskazówki i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwości.

Uwaga 2: Wskazówki te nie muszą stosować się do każdej sytuacji. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od różnych struktur, przedmiotów i ludzi.

a. Natężenia pól pochodzących od znajdujących się w pobliżu nadajników stałych, takich jak nadajniki bazowe telefonów wykorzystujących łączność bezprzewodową (komórkowych, bezprzewodowych), radiotelefonów, przenośnych amatorskich nadajników radiowych, nadajników AM, FM i telewizyjnych, nie można wyliczyć teoretycznie z odpowiednią dokładnością. W celu dokonania oceny środowiska elektromagnetycznego wytworzonego przez nadajniki radiowe należy rozważyć przeprowadzenie pomiarów elektromagnetycznych w terenie. Jeśli zmierzone w terenie natężenie pola w okolicy urządzenia przewyższa dopuszczalny poziom zgodności dot. częstotliwości radiowej, należy prowadzić obserwację, aby potwierdzić, że urządzenie działa poprawnie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania mogą być konieczne inne działania zaradcze, jak np. odwrócenie urządzenia w inną stronę lub przestawienie w inne miejsce.






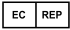

b. Dla zakresu częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno być niższe niż 3 V/m.

### Wskazówki i deklaracja producenta - emisja EMC


Elektryczny aspirator do nosa VITAMMY COLIBRI NS14 jest przeznaczony do stosowania w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik aspiratora powinien upewnić się, że jest on stosowany w takim środowisku.

| Test emisji   | Zgodność    | Wytyczne otoczenia elektromagnetycznego  |
|---|-------------|--|
| Emisja RF CISPR 11                                  | Grupa 1     | Aspirator VITAMMY COLIBRI NS14 używa promieniowania RF jedynie do celów wewnętrznych. Emisja RF jest na bardzo niskim poziomie i nie wpływa na pobliskie urządzenia elektryczne.                             |
| Emisja RF CISPR 11                                  | Klasa B     | Aspirator VITAMMY COLIBRI NS14 jest odpowiedni do stosowania we wszystkich zakładach, w tym krajowych zakładach podłączonych do niskiego napięcia zasilania sieci budynków przeznaczonych do celów domowych. |
| Harmoniczna emisja wg IEC 61000-3-2                 | Nie dotyczy |  |
| Wahania napięcia, emisja migocząca wg IEC 61000-3-3 | Nie dotyczy |  |

## ZASTOSOWANE NORMY I SYMBOLE

| Symbol  | Znaczenie   |
|---|---|
|  | Oznaczenie CE 0197 symbolizuje zgodność wyrobu z dyrektywą Unii Europejskiej EC 93/42/EEC MDD |
|  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami                                |
|  | Zapoznaj się z instrukcją   |
|  | Urządzenie typu BF  |
|  | Producent   |
|  | Autoryzowany przedstawiciel w Europie   |
|  | Temperatury graniczne   |

### UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

 Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób, jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.



## GWARANCJA

|  |   |
|--|---|
| <b>Urządzenie</b>                                    | VITAMMY COLIBRI (NS14)  |
| <b>Gwarant</b>                                       | Novamed Sp. z o.o. ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź  |
| <b>Wsparcie techniczne</b>                           | Infolinia - tel. 887 11 00 66<br>e-mail: pomoc@novamed.pl   |
| <b>Gwarancja</b>                                     | Gwarant zapewnia Nabywcę, że urządzenie VITAMMY, którego dotyczy niniejsza gwarancja, zostało zaprojektowane i wyprodukowane w oparciu o wysokie standardy jakości oraz o dobrej jakości urządzenia, brak wad materiałowych i produkcyjnych, które mogłyby zakłócać jego prawidłowe działanie. W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych w okresie niniejszej gwarancji Gwarant bezpłatnie naprawi lub wymieni urządzenie na nowe bezpłatnie w możliwie krótkim terminie nie przekraczającym <b>14 dni</b> . |
| <b>Typ gwarancji</b>                                 | Niniejsza gwarancja zakłada, że reklamowany sprzęt będzie dostarczony do serwisu na koszt Nabywcy, bezpłatnie naprawiony oraz bezpłatnie dostarczony z powrotem do Nabywcy.   |
| <b>Okres gwarancji</b>                               | 24 miesiące na urządzenie   |
|  | Bez gwarancji na części i akcesoria ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania: baterie   |
| <b>Bieg okresu gwarancji</b>                         | Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej.   |
| <b>Obszar bowiązywania gwarancji</b>                 | Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.  |
| <b>Postępowanie w przypadku stwierdzenia usterek</b> | Aby skorzystać z gwarancji, w ciągu w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady, należy skontaktować się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności uruchomienia procedury reklamacji. W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprzęt należy wysłać na adres serwisu, dołączając niniejszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu.   |

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| <b>Warunki ważności gwarancji</b>          | W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia.   |                |
| <b>Ograniczenia i wyłączenia gwarancji</b> | Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie.   |                |
|  | Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek: <ul style="list-style-type: none"> <li>• niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania</li> <li>• niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych</li> <li>• ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych</li> <li>• przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego zasilania, itp.)</li> </ul> |                |
|  | Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu.   |                |
|  | Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji obsługi.   |                |
| <b>Pieczęć i podpis sprzedawcy</b>         | Data  | Podpis klienta |
|  |   |                |

Produkt posiada certyfikat CE



# VITAMMY® COLIBRI

## INFORMACJE KONTAKTOWE

---

### Producent:



**AViTA Corporation**

9F, No.78, Sec.1, Kwang-Fu Rd.,

San-Chung District, 24158 New Taipei City, Taiwan

No.858, Jiao Tong Road,

Wujiang Economic Development Zone Jiangsu Province, P.R.C. Postcode: 215200

### Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej:



**Wellkang Ltd.,**

Suite B

29 Harley Street

LONDONW1G 9QR

United Kingdom

### Dystrybutor:



**Novamed Sp. z o.o.**

ul. Traktorowa 143

91-203 Łódź

Poland

Infolinia pomocy i wsparcia technicznego: 887 11 00 66

Wyprodukowano w Chinach / Made in China