


# ANLAN

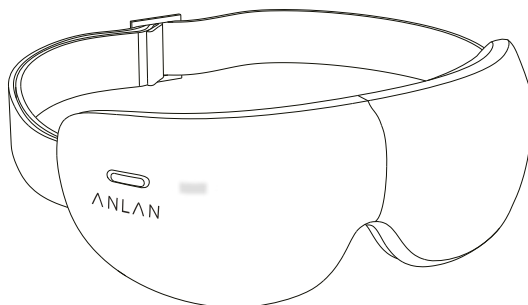

## Podgrzewany masażer do oczu

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup urządzenia ANLAN Hot Eye Care Device.

Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym używanym do diagnozowania i leczenia, ale produktem pomocniczym do ogólnego użytku domowego.

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.

## ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:

Aby zapobiec uszkodzeniom ciała i mieniu użytkowników, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i postępować zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi.



**UWAGA!!!** Nieprawidłowa obsługa może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.



Nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne.



### **UWAGA**

1. W przypadku wystąpienia bólu skóry lub ciała, a także innych nieprawidłowości, skonsultuj się natychmiast z lekarzem i zaprzestań użytkowania tego produktu.
2. Nie wkładaj ostrych przedmiotów lub innych obcych ciał do szczelin w gnieździe ładowania urządzenia głównego gdyż może to spowodować pożar, porażenie prądem lub nieprawidłowe działanie produktu.
3. Należy uważać na oparzenia spowodowane niską temperaturą w trybie podgrzewania. w trybie podgrzewania. Oparzenia niskotemperaturowe to oparzenia spowodowane przez dłuższy kontakt z elementami grzejnymi, których temperatura jest wyższa niż temperatura ciała, powodując objawy takie jak czerwone zmiany i pęcherze. Można również ulec oparzeniom niskotemperaturowym bez żadnych subiektywnych objawów.
4. Jeśli ten produkt jest uszkodzony, źle funkcjonujący, zdeformowany lub złamany, należy zaprzetać jego używania.
5. Jeśli pojawi się dym, osobliwy zapach, nienormalne ciepło, itp, należy natychmiast odłączyć produkt od zasilania i zaprzestać jego użytkowania.
6. Ten produkt nie jest produktem wodoodpornym. Nie należy go używać w wilgotnym miejscu, takim jak łazienka, w przeciwnym razie może istnieć ryzyko poparzeń, porażenia prądem lub nieprawidłowego działania.

7. Nie należy samodzielnie demontować, modyfikować ani naprawiać tego produktu. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie tego produktu i akcesoriów. Za szkody spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie producent nie ponosi odpowiedzialności.
8. Ten produkt służy do pielęgnacji oczu. Nie należy stosować go do innych celów niż pielęgnacja oczu.
9. Produktu nie należy stosować częściej niż dwa razy dziennie, aby nie spowodować obrażeń ciała.
10. Jeżeli podczas stosowania zaczniesz odczuwać nieprawidłowości, takie jak przegrzanie w oczach lub ich okolicy, natychmiast zaprzestań jego stosowania aby uniknąć oparzeń lub innych obrażeń.
11. Rozpoczynając stosowanie obserwuj swoją kondycję fizyczną oraz stan skóry aby dostosować odpowiedni czas oraz częstotliwość stosowania produktu.
12. Nie należy stosować tego produktu podczas snu.
13. Przed rozpoczęciem stosowania produktu należy zmyć makijaż.
14. Przed rozpoczęciem stosowania produktu należy usunąć sztuczne rzęsy, okulary, soczewki kontaktowe, kolczyki, klipsy do włosów, peruki oraz inne akcesoria znajdujące się na twarzy lub jej okolicy aby uniknąć wystąpienia problemów z oczami oraz skórą.
15. W trakcie stosowania produktu oczy lub ich obszar mogą stać się ciepłe lub zaczerwienione. Efekt ten jest czasowy. Jeżeli jednak objaw ten nie ulegnie poprawie, skonsultuj się ze specjalistą.
16. Osoby, które cierpią na choroby układu krwionośnego, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby starsze oraz dzieci powinny zachować szczególną ostrożność i stosować ten produkt tylko pod nadzorem opiekuna.




## OSTRZEŻENIE

Nie należy stosować tego produktu w przypadku następujących osób:


1. Osoby posiadające implanty z metalu, silikonu, plastiku znajdujące się na twarzy lub jej okolicach.
2. Osoby z ciężką krótkowzrocznością (patologiczna krótkowzroczność).
3. Osoby z chorobami oczu, po operacjach oczu.
4. Osoby po udarze mózgu.
5. Osoby z podwyższonym lub obniżonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym
6. Osoby z chorobami układu krążenia.
7. Osoby będące tuż po ciąży oraz porodzie.
8. Osoby, które nie są w stanie prawidłowo odczuwać temperaturę.
9. Osoby, które czują się źle po spożyciu alkoholu

## OPIS PRODUKTU

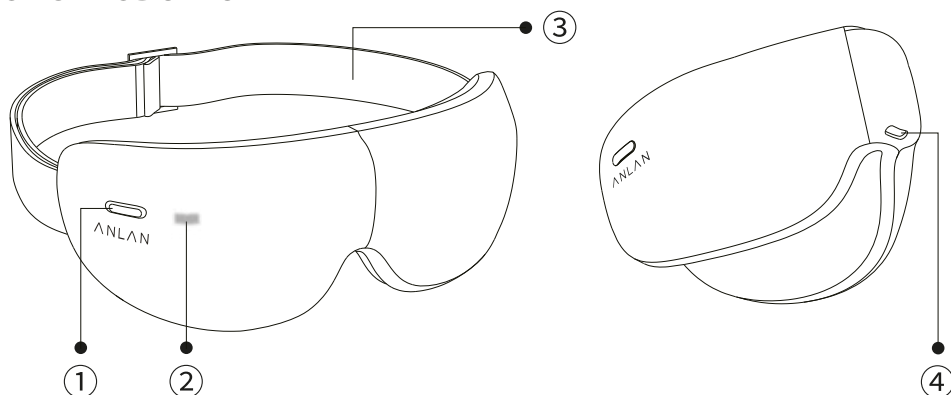


- |                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ① Przycisk zasilania/ przełącznik trybu gorącego/ trybu wibracji | ③ Pasek z regulacją |
| ② Lampka kontrolna                                               |                     |
| ④ Port ładowania typu-C                                          |                     |


**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:**

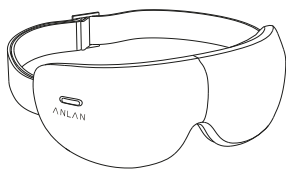

Podgrzewany  
masażer do oczu  
x1

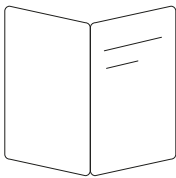

Instrukcja obsługi x1

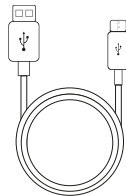

Kabel do ładowania  
typu -C x1

**SPECYFIKACJA**

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Podgrzewany masażer do oczu                                                       |
| Model                          | YXA-E1                                                                            |
| Wymiary                        | Okolo 159x54x59mm                                                                 |
| Temperatura pracy              | Niska temp. (38°C±2°C)<br>Umiarkowana temp. (40°C±2°C)<br>Wysoka temp. (42°C±2°C) |
| Pojemność akumulatora          | 800mAh                                                                            |
| Napięcie wejściowe             | DC5V 1A                                                                           |
| Moc                            | 5W                                                                                |
| Czas ładowania                 | Okolo 3 godziny                                                                   |
| Czas automatycznego wyłączenia | Okolo 15 minut                                                                    |
| Waga                           | Okolo 98g                                                                         |
| Materiał                       | ABS                                                                               |

## Wykaz kombinacji trybów pracy

Niska temperatura ( $38^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ) + wibracja estetyczna

Umiarkowana temperatura ( $40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ) + wibracja estetyczna

Wysoka temperatura ( $42^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ) + wibracja estetyczna

Niska temperatura ( $38^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ )

Umiarkowana temperatura ( $40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ )

Wysoka temperatura ( $42^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ )

## SPOSÓB UŻYTKOWANIA:

Przycisk zasilania/działania:

Domyślnym ustawieniem przy uruchamianiu jest niska temperatura + wibracje estetyczne.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/działania przez 2 sekundy lub więcej, aby włączyć (wyłączyć) zasilanie.

2. Jeżeli chcesz zmienić poziomy temperatury, naciskaj krótko przycisk zasilania/działania. Kolejność to: niska temperatura > umiarkowana temperatura - wysoka temperatura > niska temperatura.

Przełączanie trybów:

### **Niska temperatura**

zawibruje raz i lampka kontrolna mignie raz

### **Umiarkowana temperatura**


zawibruje dwa razy i lampka kontrolna mignie dwa razy

### **Wysoka temperatura**

zawibruje trzy razy i lampka kontrolna mignie trzy razy


\* Szybko naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania/działania, aby włączyć (wyłączyć) tryb wibracji estetycznej.

Ten produkt posiada funkcję pamięci. (Tryb ustawień użyty ostatnio jest zapamiętywany, a ten sam tryb jest ponownie uruchamiany przy następnym użyciu).

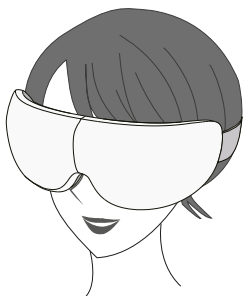

Nałóż główny korpus na oczy. Umieść wgniecenie w dolnej części korpusu na nosie i dopasuj go tak, aby oczy znajdowały się w środku korpusu.

Jeśli pasek jest zbyt luźny lub zbyt ciasny, wyreguluj klamrę paska, aby dopasować go do swojej głowy.

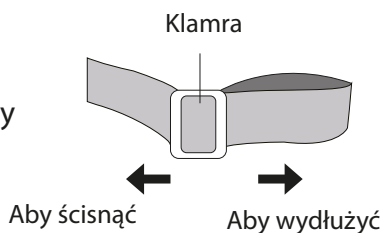

## INSTRUKCJA ŁADOWANIA

Należy upewnić się, że ładowanie odbywa się w warunkach określonych w niniejszej instrukcji.

1. Jeśli używasz tego produktu po raz pierwszy lub nie używałeś go przez dłuższy czas, przed użyciem należy go ładować przez około 3 godziny. Ponadto, aby chronić wbudowany akumulator, należy go ładować raz w miesiącu, nawet jeśli nie jest używany przez dłuższy czas.
2. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, lampka kontrolna będzie migać.
3. Podczas ładowania miga lampka kontrolna. Po zakończeniu ładowania lampka kontrolna zaświeci się. Pełne ładowanie trwa ok. 3 godziny. (Uwaga: Czas ładowania może się różnić w zależności od środowiska ładowania).
4. Nie należy używać produktu w trakcie jego ładowania.
5. Aby zapobiec przeładowaniu, proszę odłączyć kabel po zakończeniu ładowania. Kontynuacja ładowania przez zbyt długi czas spowoduje szybsze zużycie się akumulatora oraz skrócenie jego żywotności.
6. Ładowanie powinno odbywać się w pomieszczeniu o temperaturze pomiędzy 10°C a 30°C. Ładowanie w niskiej temperaturze może skrócić żywotność akumulatora.
7. W przypadku ładowania za pomocą portu USB komputera lub innego urządzenia czas ładowania może ulec wydłużeniu.
8. Do ładowania należy używać dołączonego kabla. W przypadku zastosowania kabla do ładowania o napięciu innym niż podane, ładowanie może nie być możliwe.
9. Podczas ładowania urządzenie główne może się lekko nagrzewać, ale nie jest to usterka.
10. Funkcja automatycznego wyłączania: Produkt będzie się automatycznie wyłączać się po około 15 minutach od włączenia.
11. Jeżeli po pełnym naładowaniu, czas pracy akumulatora jest zbyt krótki, lub jeśli wystąpią jakiegokolwiek inne nierównowagi w działaniu produktu, skonsultuj się z działem obsługi klienta.

## KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

### Czyszczenie:

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że produkt jest odłączony od zasilania.
2. Nie należy używać rozpuszczalników takich jak rozcieńczalnik, benzyna, alkohol, chemikalia lub wrząca woda do czyszczenia produktu. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować nieprawidłowe działanie, uszkodzenie części, odbarwienie itp.
3. Przetrzyj jednostkę główną miękką, suchą szmatką.
4. Jeżeli produkt jest bardzo brudny, użyj gąbki lub miękkiej ściereczki nasączonej wodą i wyciśnij ją, aby wytrzeć, a następnie wytrzyj do sucha.

Prosimy nie przechowywać w następujących miejscach. W przeciwnym razie, może to spowodować wypadek, obrażenia lub nieprawidłowe działanie.

1. Miejsca dostępne dla niemowląt i zwierząt domowych.
2. Miejsca narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
3. Miejsca o dużej wilgotności oraz miejsca zakurzone.
4. Miejsca podatne na wibracje lub wstrząsy.
5. Miejsca, w których występuje silne pole magnetyczne.

**Przechowuj produkt zawsze w pozycji poziomej!**

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

### Nie działa

Słaba moc akumulatora.

Jeżeli produkt wyłączy się w przeciągu 15 minut należy go naładować używając dołączonego kabla.

Czy przytrzymałeś przycisk zasilania?

Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania nie spowoduje włączenia urządzenia.

Przytrzymaj go przez co najmniej 2 sekundy.

Jeśli problem nadal występuje

Prosimy o kontakt, ponieważ może to być awaria urządzenia.

### **Brak możliwości ładowania, nawet po naładowaniu, żywotność akumulatora jest bardzo krótka**

Nieprawidłowe podłączenie kabla lub zasilacza USB.

Zbyt luźno włożona wstyczka

Jeśli temperatura otoczenia jest bardzo niska lub

bardzo wysoka, urządzenie może nie działać normalnie. Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia od 10°C do 30°C.

Po naładowaniu po raz pierwszy lub po długim okresie nieużywania, żywotność akumulatora może ulec skróceniu. Może on powrócić do normy po wielokrotnym użyciu.

Zły zasilacz

Należy upewnić się, że napięcie oraz natężenie prądu są zgodne z wartościami podanymi w instrukcji.

# Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>