


momcozy

MASAŻER LAKTACYJNY

LM02

Instrukcja obsługi

WAŻNE! NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z
NINIEJSZYMI INSTRUKCJAMI ORAZ ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ.

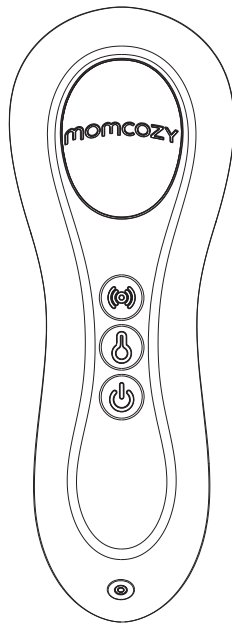

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ OSOBY O OGRANICZONYCH ZDOLNOŚCIACH FIZYCZNYCH, SENSORYCZNYCH LUB UMYSŁOWYCH LUB OSOBY NIEPOSIADAJĄCE DOŚWIADCZENIA I WIEDZY, JEŚLI SĄ ONE NADZOROWANE LUB ZOSTAŁY POINSTRUOWANE W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA I ROZUMIEJĄ ZWIĄZANE Z TYM ZAGROŻENIA;
- DZIECI NIE MOGĄ BAWIĆ SIĘ URZĄDZENIEM;
- CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NIE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ DZIECI BEZ NADZORU;
- NIE NALEŻY WRZUCAĆ AKUMULATORA DO OGNIĄ LUB GORĄCEGO PIEKARNIKA ANI MECHANICZNIE ZGNIATAĆ LUB PRZECINAĆ AKUMULATORA, PONIEWAŻ MOŻE DOPROWADZIĆ TO DO WYBUCHU
- POZOSTAWIENIE AKUMULATORA W OTOCZENIU O EKSTREMALNIE WYSOKIEJ TEMPERATURZE MOŻE SPOWODOWAĆ WYBUCH LUB WYCIEK ŁATWOPALNEJ CIECZY LUB GAZU
- PODDANIE AKUMULATORA DZIAŁANIU SKRAJNIE NISKIEGO CIŚNIENIA POWIETRZA, KTÓRE MOŻE SPOWODOWAĆ WYBUCH LUB WYCIEK ŁATWOPALNEJ CIECZY LUB GAZU.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Oświadczenie o zgodności z przepisami UE: Hong Kong Lute Technology Co., Limited

Niniejszym oświadczam, że niniejsze urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/UE.

UTYLIZACJA

Po zakończeniu cyklu życia produktu nie należy wyrzucać go do śmieci domowych, lecz dostarczyć do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektronicznego i akumulatorów. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może mieć potencjalnie szkodliwy wpływ na środowisko. Niewłaściwa utylizacja może prowadzić do gromadzenia się szkodliwych toksyn w powietrzu, wodzie i glebie, co jest szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. użytkownik ma obowiązek prawidłowo zutylizować urządzenie. Informacje na temat utylizacji można uzyskać w urzędzie gminy.




OSTRZEŻENIE

- Ten masażer laktacyjny jest przeznaczony dla jednego użytkownika. Nie należy go wypożyczać ani udostępniać.
- NIE należy zezwalać na korzystanie z produktu osobom niezaznajomionym z jego obsługą.
- NIE należy używać, jeśli kabel ładujący lub produkt są uszkodzone. Skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta w celu wymiany.
- Jeśli obudowa kabla ładującego lub okablowanie poluzuje się, oddzieli lub postrzępi, należy natychmiast zaprzestać korzystania z kabla ładującego i skontaktować się z producentem urządzenia.
- W przypadku użytkowników z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną wymagany jest stały nadzór rodziców lub opiekunów
- Nie należy czyścić ani sterylizować produktu za pomocą pralki, kuchenki mikrofalowej lub zmywarki.
- Ten masażer laktacyjny ma pomóc kobietom w przezwyciężeniu niektórych wyzwań związanych z karmieniem piersią, takich jak nabrzmiałe piersi lub zatkane kanaliki mleczne. Należy go używać ściśle zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
- Należy używać wyłącznie kabla do ładowania dołączonego do urządzenia.

WSKAZANIA

Masażer laktacyjny Momcozy ma na celu złagodzenie bólu i dyskomfortu związanego z karmieniem piersią, zatkany przewodem, obrzękiem i zapaleniem sutka. Ponadto przyspiesza odciąganie pokarmu i wypływ mleka.

PRZEGLĄD PRODUKTU

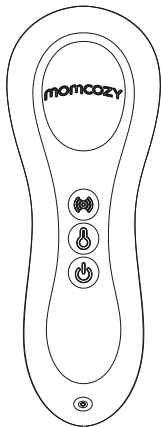

Masażer laktacyjny * 1



Kabel do ładowania * 1




Torba * 1



Instrukcja obsługi * 1

OPIS PRODUKTU

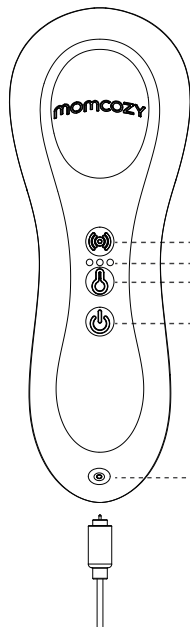

Regulacja ciepła:

- ○ ○ Niska temperatura (37 °C)
- ● ○ Średnia temperatura (41 °C)
- ● ● Wysoka temperatura (45 °C)

..... Sterowanie kulami masującą

..... Wskaźnik temperatury

..... Regulacja temperatury

..... Kontrola zasilania i wibracji

..... Magnetyczny port ładowania USB



Zasilanie/sterowanie wibracjami
Naciśnij i przytrzymaj przez 1,5 sekundy, aby przejść do trybu czuwania, a wskaźnik pozostanie świecący na biało. Po naciśnięciu przycisku zasilania masażer zmieni 6 wzorów wibracji.



Sterowanie kulami masującymi
W trybie czuwania naciśnij przycisk, aby aktywować kule masujące. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje zmianę prędkości masażera na niską/średnią/wysoką/pauzę.



Regulacja temperatury

W trybie czuwania naciśnij przycisk, aby zmienić tryb z niskiego (37 °C)/średniego (41 °C)/wysokiego (45 °C/pauzy.



Wskaźnik akumulatora

W trakcie ładowania - wskaźnik będzie migał na biało.

W pełni naładowany - wskaźnik będzie świecił na biało.

Podczas pracy - wskaźnik będzie świecił na biało.


Niski poziom naładowania akumulatora - wskaźnik będzie migać na biało i zgaśnie po wyczerpaniu akumulatora.

ŁADOWANIE MASAŻERA

1. Podłącz dostarczony kabel ładowający do masażera
2. Podłącz USB do komputera lub zasilacza USB (DC 5V 1.5A).
3. Wskaźnik będzie migał na biało podczas ładowania masażera.
4. Masażer jest w pełni naładowany, gdy wskaźnik świeci na biało.
5. Pełne naładowanie urządzenia zajmuje około 1,5 godziny. W razie potrzeby należy ponownie naładować masażer.


SPOSÓB UŻYCIA

1. Użyj kulek do masażu, aby dotrzeć głębiej do przewodów piersiowych i delikatnie masuj zatkany obszar piersi.

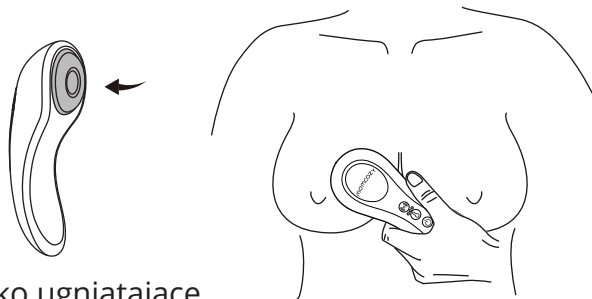


Głęboko ugniatające
kulki do masażu


2. Masuj zatłokany obszar na piersi za pomocą wygodnego schematu wibracji.

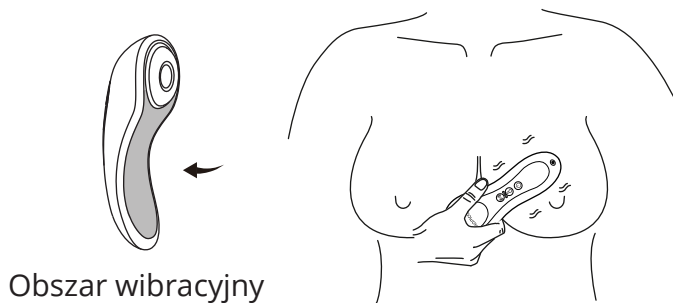

3. Odczekaj kilka minut, aż masażer osiągnie pełną temperaturę i rozgrzeje pierś, aby stymulować przepływ mleka.

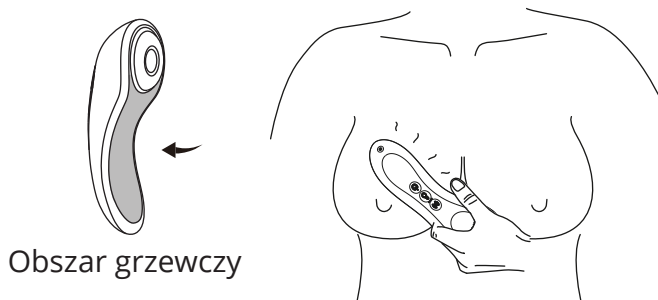

4. Masuj zatkany obszar na piersi zakrzywioną stroną, przesuwając się w kierunku sutka.

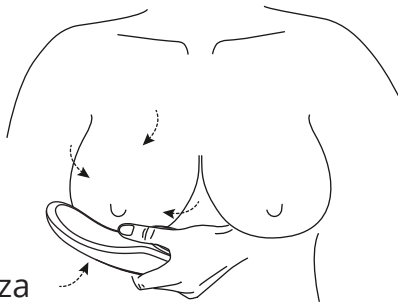

Masuj zatkany obszar za
pomocą zakrzywionej
strony urządzenia

Uwaga:

1. Podczas nagrzewania, po 20 minutach urządzenie przełączy się z wysokiej temperatury na niską. Wyłączy się automatycznie po 30 minutach nagrzewania.
2. Nie można włączyć urządzenia podczas ładowania.
3. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator.
4. Poczekaj kilka minut, aż masażer osiągnie pełną temperaturę.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Zawsze czyścić masażer przed i po każdym użyciu.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Czyścić ciepłą wodą.
- NIE zanurzać masażera w wodzie.
- Pozostawić masażer do wyschnięcia na powietrzu.
- Unikać bezpośredniego światła słonecznego.
- Masażer należy przechowywać w czystym i wolnym od kurzu miejscu.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa produktu: Masażer laktacyjny

Model: LM02

Waga netto: 150g

Napięcie wejściowe: 5V 1A

Temperatura pracy: 0 °C do 47 °C

Temperatura przechowywania: -10 °C do 60 °C

Rozmiar produktu: 152 mm * 55 mm * 51 mm

Pojemność akumulatora: 1200 mAh

Rozmiar opakowania: 176*86*58 mm

UK**REP**

Prolinx Global LTD

27 Old Gloucester Street London, WC1N 3AX, UK

EC**REP**

Prolinx GmbH

Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf Germany



Producent: Hong Kong Lute Technology Co., Limited

Adres: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38

Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong

(Pokój 02, piętro 21, Hip Kwan Commercial Building, ulica

Pitt 38, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong)

Email: support@momcozy.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.